

ペン型COVID-19唾液抗原検査キット簡易取り扱い説明書

型番:BSV-COV-2PEN


ご注意事項

- 検査前30分は、飲食、喫煙、歯磨きを避けて下さい。
- キットが個包装されているパウチの袋に破損がある場合や、袋の開封時期が不明なものは使用しないでください。

テスト手順


- ①使用前に、デバイスを室温（18～30℃）になじませます。
- ②パッケージから、唾液採取ペンと抽出バッファーキャップを取り出します。
- ③ペンに被験者名をラベルします。
- ④痰を切ってから、サンプルを採取する前に、口を閉じた状態で4回深く咳をします。
- ⑤唾液採取ペンのスワブカバーを取り外します。
- ⑥カバーを外したペン先を口に含んで舌の上に置き、2分間保持します。
- ⑦ペンを口から取り出し、ペン先を下にして垂直にします。
- ⑧ペン先をバッファーキャップに突き刺し、シールを破って溶液に浸します。
- ⑨シールを破った直後にタイマーを起動し、15分後に結果を確認します。

本キットの使用イメージ

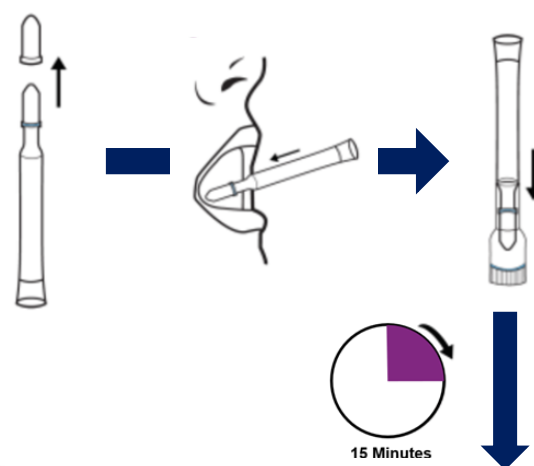


【検査無効（左の図）となる原因】


- 検体（唾液）量の不足
対処法）手順⑧で、バッファーキャップへの差し込み不足 - シールが破れる手ごたえを感じるまで差し込む必要があります。
- 検査キットの期限切れ

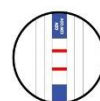

Positive
陽性

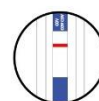

Negative
陰性

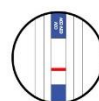

Invalid
検査無効

※詳細は同梱されている英文のガイドをご覧ください。

【はじめにお読みください】

- ・本製品は、医薬品医療機器等法に定められた体外診断用医薬品ではなく、疫学調査等のための試験研究を目的とするものであり、新型コロナウイルス感染症の診断を行うことを目的とするものではありません。
- ・本キットの検査精度は100%ではありません。
- ・ご購入済みの本製品についてのお問い合わせを頂く際は、「ご所属の会社名または団体名」をお知らせの上、製品のロット番号をご用意の上お問い合わせください。ロット番号は製品外箱とキットの個包装パッケージに記載されております。

株式会社 エムエステクノシステムズ



- 東日本 〒162-0805
東京都新宿区矢来町113番地
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669
- 西日本 〒532-0005
大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644
e-mail: technosales@technosaurus.co.jp
URL: <http://www.mstechno.co.jp>

※本製品は研究用です。研究用途以外には使用できません

- 会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。