

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

使用の手引き

重要

- 本検査キットはセットアップに約5分かかり、試験結果は15分後に読み取る必要があります
- 正しい結果を得るためには、本説明書に注意深く従うことが重要です
- 試験前に、試験用備品とバッファー溶液は室温（15～30℃）に戻しておく必要があります
- 試験前後には、手を洗うか消毒してください。他者に試験を行う場合、必要な安全対策を取ってください（例：フェイスマスク、手袋）

はじめに (GCCOV-502a-H1)

キット内容

- ①滅菌済みスワブ
- ②テストデバイス
- ③抽出用チューブ（バッファー入、チップ付属）
- ④使用説明書
- ⑤使用の手引き


本品以外に必要なもの

時計、タイマー、またはストップウォッチ
廃棄物を入れるビニール袋



ステップ 1.

チューブをキット外箱の穴に挿入します。チューブ上部にあるシールフィルムを外します。

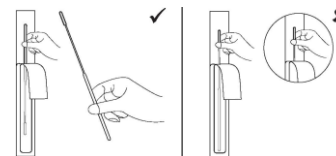


ステップ 2.

スワブパッケージを所定の場所で開封してください。プラスチックの端を掴んでスワブを引き抜きます。スワブ先端の綿球部分には触れないでください。



ステップ 3.

スワブ先端の綿球を左鼻腔に注意深く挿入してください。スワブの先端全体が鼻腔内に入っているようにしてください（深さ2～4 cm）。抵抗を感じたら、それ以上スワブを奥に差し込まないでください。

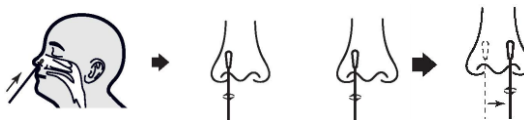

ステップ 4.

鼻腔内で、粘膜に沿ってスワブ先端の綿球を5回以上転がしてください。ステップ3.とスワブ先端の綿球と鼻腔の内側がよく接触するようにしてください。


ステップ 5.

鼻腔からスワブを取り出し、右の鼻腔に挿入します。ステップ3.と同じ操作を行います。



ステップ 6.

鼻腔からスワブを取り出し、綿球をチューブの液の中に入れます。

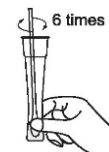

ステップ 7.

チューブの底や側面に、スワブ先端の綿球を押し付けながら6回以上転がし、よく混ぜます。



1 Minute

ステップ 8.

タイマーを開始します。綿球をチューブ内に1分間放置します。



ステップ 9.

チューブを外側から数回揉み、綿球からできるだけ多くの検体をしぼり出します。




ステップ 10.

スワブを取り出し、ビニール袋に入れて廃棄します。




ステップ 11.

キットに付属のドロップパーチップをチューブに押し込み、しっかりとフィットするよう取り付けます。

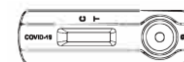

ステップ 12.

袋からテストデバイスを取出し、平らで清潔な場所に置きます。

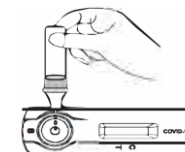

ステップ 13.


チューブをゆっくり絞ってサンプルを4滴、テストデバイスのサンプルウェル(Sの表記あり)に滴下します。



15 Minutes


ステップ 14.

タイマーを開始し、15分後に結果を読み取ります。15分後に結果を読み取ることが大切です。

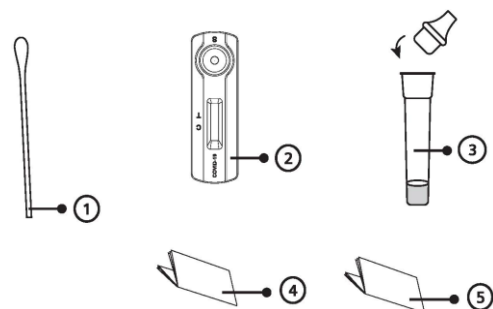


ステップ 15.

結果を読み取ります。想定される結果は次の3パターンです

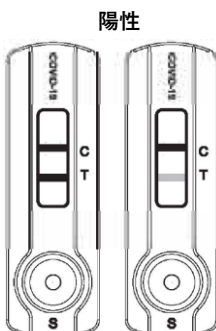


陽性

テストデバイスが左のいずれかのようなウィンドウになれば、陽性の結果です

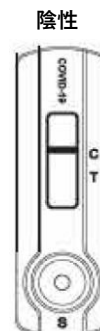

陰性

テストデバイスが左のようなウィンドウになれば、陰性の結果です。

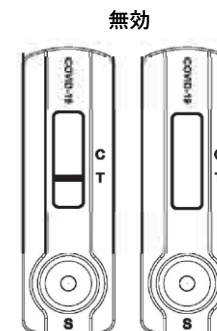

無効

線が見えない、またはTのところだけに線があるなど、試験結果が異なっている場合、結果は無効です。これは試験方法の間違いの結果である可能性があり、試験を繰り返す必要があります。